

Apraksts

Incidin Active

Sporicīds mazgājošs virsmu dezinfekcijas līdzeklis medicīnas inventāram

Mūsu piedāvājums

- plašs spektrs un īsi ekspozīcijas laiki
- darbība bāzējas uz aktīvo skābekli
- ļoti labas mazgāšanas spējas
- svaiga smarža

Pielietošanas joma:

Medicīniskā inventāra virsmu dezinfekcijai, piemērots arī citām mazgājamām virsmām

Dozēšana un pielietošana:

2% šķīduma pagatavošanu veic: ņemiet 8 litri ūdens, kurā ieleberiet 160 g Incidin Active un pirmo 15 min laikā vairākkārt apmaisiet. Tad šķīdums ir gatavs darbam. Nerekomendē lietot uz virsmām, kur iespējama materiālu oksidācija ar aktīvo skābekli

Mikrobioloģiskie un virusoloģiskie rādītāji:	Koncen tr.	Ekspozīcija
Iedarbība uz rauga sēnītēm atb. EN 1650	2 %	15 min.
Iedarbība uz sporām atb. EN 13704	2 %	5 min.
Iedarbība uz baktērijām atb. EN 13697	2 %	5 min.
Iedarbība uz vīrusiem atb. PZH	2 %	10 min.

Sastāvdaļas atbilstoši 89/542/EG rekomendācijām: >30% balinātājs uz skābekļa bāzes, < 5% bezjonu tenzīdi. Pārējās sastāvdaļas: Skābekļa aktivators (TAED), kompleksu saistītāji, smaržēļas. Aktīvā viela Peretiķskābe veidojas, pagatavojot darba šķīdumu.

Produkta bīstamība

Xn – Kaitīgs;

Trauku cieši jānoslēdz. Iepakojuma saturu jāsargā no mitruma. Uzglabāt oriģināliepakojumā zem 25°C. "Dezinfekcijas līdzekļus drīkst kombinēt ar citiem produktiem tikai tad, ja ir pieejamas konkrētās kombinācijas mikrobioloģiskās pārbaudes". Satur: nātrija perkarbonātu.

R22 Kaitīgs veselībai norijot. R36/38 Kodīgs acīm un ādai. S2 Sargāt no bērniem. S22 Putekļus neieelpot. S25 Izvairīties no saskarsmes ar acīm. S26 nokļūstot acīs- nekavējoties pamatīgi skalot ar ūdeni un konsultēties ar ārstu. S37 Strādājot jāvalkā piemērotus aizsargcimdus. Trauku cieši jānoslēdz. Iepakojuma saturu jāsargā no mitruma. Uzglabāt oriģināliepakojumā zem 25°C. "Dezinfekcijas līdzekļus drīkst kombinēt ar citiem produktiem tikai tad, ja ir pieejamas konkrētās kombinācijas mikrobioloģiskās pārbaudes

Iepakojums: 160 g kārbā

Kods: YAX 4